

# Vejledning

Før du påbegynder formstøbningen af dine nye Ahead ACME ørepropper, bør du læse denne vejledning grundigt igennem.

1. Vask dine hænder, og rens dine ører.
2. Sørg for at have et spejl klar.
3. Luk emballagen op, og læs den medfølgende brugsanvisningen grundigt igennem, før du går igang.
4. Åbn de to beholdere, og del hver beholders indhold i to lige store klumper
5. Tag nu en klump af hver farve, og ælt dem sammen. Når du får en helt jævn og ens farve, er materialet klar til brug. Det tager ca. 45 sekunder at ælte dem ordenligt sammen.
6. Se i spejlet, og sæt kuglen midt på øret (ved indgangen)
7. Sørg for at holde din mund let åbnet og i samme position. Tal ikke og tyg ikke. Det er tilrådeligt at bide om en kuglepen eller lignende.
8. Pres nu forsigtigt materialet ind i det første øre ved at trykke i midten af kuglen. Det materiale, der måtte ryge til siderne, foldes ind over midten og presses med ind igen.
9. Når du fornemmer, at du har presset nok materiale ind i øret (og der ikke længere slipper lyd ind), kan du fjerne evt. overskydende materiale og derefter glatte overfladen ud. Er du for længe om dette trin, risikerer du, at materialet størkner så meget, at du ikke længere kan give dine ørepropper en pæn finish.
10. Gå nu til punkt 5, og gentag processen for dit andet øre.
11. Vent 10-20 minutter. Herefter kan du forsigtigt tage ørepropperne ud - evt. hjulpet på vej ved at løfte lidt op i din øreflip eller dit øre.
12. Lad nu ørepropperne hvile i ca. 3-4 timer (optimalt et døgn).
13. Dine Ahead ACME ørepropper er nu klar til brug.

**Rigtig god fornøjelse!**

